


M リンク

補聴器をつけたまま音楽を鑑賞するための2種類の誘導コイル

■ M リンクの使用方法

1. M リンクの 3.5mm プラグを DVD・CD プレーヤ
MP3 プレーヤなどの出力端子に接続します。
2. 補聴器のスイッチを「T」または「MT」に合わせて
テレコイルを有効にします。
3. M リンクの耳かけ用フックを耳にかけます。

※ M リンク・ステレオをモノラル音源に接続した場合、
M リンク・ステレオの右側から音は出力されません。

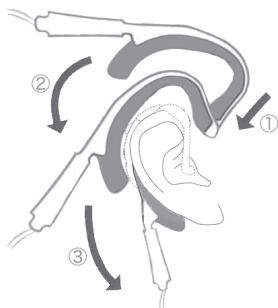

M リンク装着方法

■ M リンクの種類

M リンクは DVD・CD プレーヤ・MP3 プレーヤなどの音源に接続し、テレコイルを内蔵した補聴器と一緒に耳に装着します。

磁気誘導作用により音源に接続した M リンクを通して音楽や音声は補聴器に直接伝導されます。ただし、聴こえの効果には個人差があります。

M リンクには ①M リンク・モノ (片耳用) ・②M リンク・ステレオ (両耳用) の2種類があり補聴器のご使用状況により最適なものをお選びいただけます。

音源から離れたところで使用する場合は、別売りの③延長ケーブル (5m) をご利用ください。

