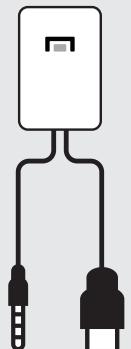
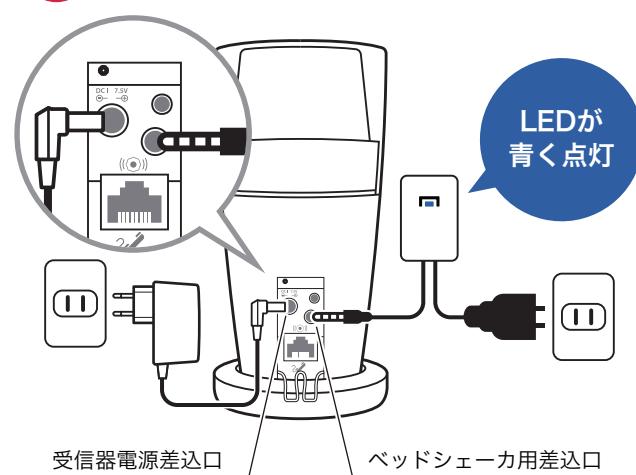


## 内容品

- モバイル発信器

(USBアダプタ)  
別売

## 1 フラッシュ受信器にモバイル発信器を接続

LEDが  
青く点灯

受信器電源差込口

ベッドシェーカ用差込口

2 お客様のスマホに  
ベルマンモバイルをインストール

⚠ 推奨OSバージョン  
iPhone iOS14以上  
Android OS10以上

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google Play

ベルマンモバイル

検索

ver.1.2.0

使い方

「使い方」で操作方法が分かります。

## 3 準備完了！受信を開始しよう



## 動作確認

アプリの動作中（緑の円）を確認したら、屋内信号装置を動作させて確認します。アプリに通知が届き、振動すれば正常に動作しています。

ベルマンビジット  
発信器

ベルマンビジット発信器の操作	モバイル発信器LED	アプリの表示/通知
ドアセンサ発信器 テストボタン1・2同時押し	● 緑色	来客／ドア
呼び出しボタン ボタンを押す	● 緑色	来客／ドア
マルチセンサ発信器 テストボタン1・2同時押し	● 黄色	FAX／電話
ベビー発信器 テストボタン1・2同時押し	● 橙色	赤ちゃん
火災警報発信器 テストボタン1・2同時押し	● 赤色	火災

※ ビジット発信器の詳しいテスト方法は各センサマニュアルを参照ください。

## 故障かな？と思ったら

## ● 正常に動作しない時

- ベルマンビジットシステムが正常に作動していることを確認してください。
- モバイル発信器がフラッシュ受信器のベッドシェーカ差込口に接続され、電源が入っている（LEDが青）ことを確認してください。
- アプリまたはスマートフォンを再起動してください。
  - スマートフォンの設定で BluetoothがONになっているか確認してください。
  - スマートフォンの位置情報の設定が「常に許可」となっているか確認してください。
  - スマートフォンの通知設定で「ベルマンモバイル」の通知がONになっているか確認してください。
  - Bluetoothを一度OFFにしてから、再度ONにしてみてください。
- iPhoneの場合、アプリを完全に終了（タスク削除）すると動作しません。  
※ バックグラウンドで起動しているか確認してください。

## ● フラッシュ受信器の信号と別の通知がくる

- ベルマンビジットの各発信器の振動パターンは初期設定でお使いください。  
振動パターンを変更した場合、ベルマンモバイル発信器が別の通知として認識される場合があります。  
※ 正常動作：フラッシュ受信器とベルマンモバイルのLEDが同じ色に光ります。

## 通知が届きにくい場合

信号が届きにくい、距離を延ばしたい場合は中継機をご利用ください。（裏面記載）


## ⚠ ご注意

- フラッシュ受信器専用です。アラームクロック受信器には使用しないでください。
- ベッドシェーカとの併用はできません。
- スマートフォンの機種によって動作しない場合があります。
- ※ 上記が原因での故障は、保証対象外となります。

## ベルマンモバイル中継器（BEBMR）

ベルマンモバイル発信器の信号を中継して信号の距離を伸ばします。

※ ベルマンモバイル発信器と中継器は別商品です。

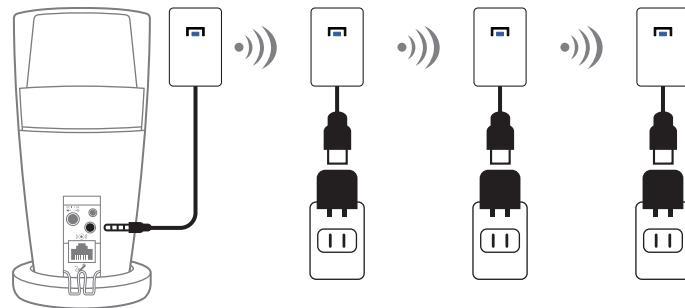

### 内容品



(USBアダプタ)  
別売

1

### コンセントにさすだけ

フラッシュ受信器を動作させ、ベルマンモバイル発信器と同じLEDが光ることを確認してください。



● ご注意  
● 中継器のみでは動作しません。

### 品質保証

ご購入後一年間は、製造に起因する材質上、性能上の欠陥につきましては、修理または商品交換にて品質保証いたします。使用上の不注意による故障や製品に付属するケーブル類の断線・破損は保証対象外となります。



ベルマンモバイル発信器（BEBMT）



ベルマンモバイル中継器（BEBMR）

販売代理店：ご購入日

年 月 日