

ベルマンビジット 充電器

BE1260



使用方法

〈取り付けと機器のテスト〉

充電器は同梱のスタンドを取り付けて卓上に置くか、同梱のネジを打ちつけて吊り下げることができます。

1. 充電器を主電源に接続します。
2. 充電器にページャ受信機 (BE1470) を接続すると、充電器の LED **[3]** は緑色に点灯します。
初めて充電する時は約8時間かかります。フル充電されると LED **[3]** は消灯します。
3. ベッドシェーカ (BE1270BV) を2つまで出力端子に接続することができます。
4. ベルマンビジットの発信機のテストボタンを押します。
5. 接続しているページャ受信機の LED が、発信機の種類に応じて点灯し、充電器に接続しているベッドシェーカが振動します。


トラブルシューティング

故障かなと思ったら、販売元や輸入元に修理を依頼する前に下記のことをご確認ください。

症状	対策
ページャ受信機を充電器に接続しても充電されない。	充電器の電源コードが正しくコンセントに接続されているか、またはページャ受信機が正しく充電器に接続されているかを確認してください。充電中は、充電器の LED [3] が点灯します。
アラーム信号があるにも関わらずベッドシェーカが振動しない。	ベッドシェーカが充電器に正しく接続されているか、またはページャ受信機が正しく充電器に接続されているかを確認してください。

仕様・技術情報

- サイズ : 78×88×43mm
重量 : 385g
色 : 白
電源コード : 1.7m
主電源 : AC アダプタ 7.5V DC/800mA 内蔵電源装置
電池 : NiMH 内蔵バックアップ電池 (内蔵バックアップ電池の交換は販売店または輸入元にご相談ください。)
充電 : AC アダプタ経由で充電。
内蔵バックアップ電池のフル充電には約8時間かかります。
アクセサリ : ベッドシェーカ (BE1270BV)

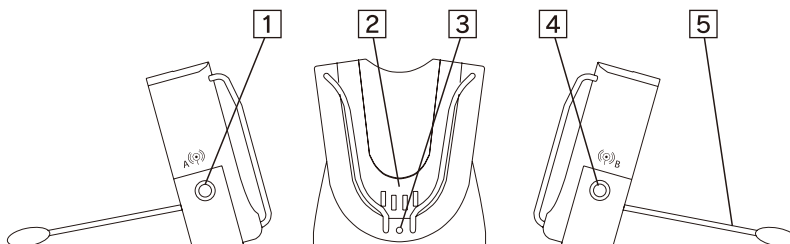

- [1]** ベッドシェーカ用出力端子 A **[4]** ベッドシェーカ用出力端子 B
[2] 充電用接点 (アラーム時計用接続端子としても利用可)
[3] LED **[5]** スタンド