

携帯式電話音量増幅器


マイアンプⅡ

操作マニュアル



株式会社自立コム
<http://www.jiritsu.com/>


各部名称

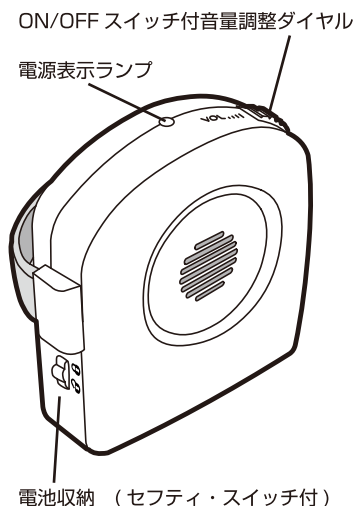

同梱



UA30 本体

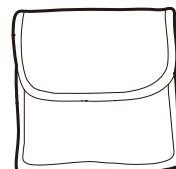

携帯用ケース




単 4 アルカリ電池 x 2 本
(モニター用電池)



マニュアル

使用方法

1. 右図のように、マイアンプⅡの集音盤を電話の受話器の受話部に密着し、ゴムバンドを受話器に掛けて固定します。
2. マイアンプⅡを耳に当てて音量調整ダイヤルを回転してスイッチを入れます。電源が入ると電源表示ランプが点灯します。その後、ダイヤルを回して最も聞きやすい音量の位置に合わせます。
3. 会話が終わりましたらダイヤルを逆方向に最後まで回してスイッチを切ります。



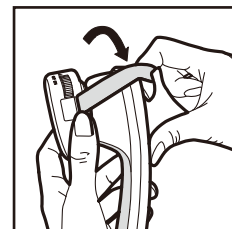


ご注意

1. テレコイル内蔵の補聴器をご使用の場合は、補聴器のスイッチを「T」の位置に合わせて、マイアンプⅡを補聴器に近づけて会話をしてください。磁気誘導により、会話がより鮮明に聞こえ、雑音を低減することがあります。
2. 「キーン」というようなハウリング音が発生する場合は、マイアンプⅡと受話器がピッタリ密着していることを確認してください。または、マイアンプⅡの音量を少し下げると回避できる場合があります。
3. マイアンプⅡは、携帯電話、コードレス電話、親子電話など無線による送受信を行う電話機では雑音により会話が困難な場合があります。
4. 音量増幅効果が得られなくなったり電源表示ランプの光が弱くなったりした場合は、新しいアルカリ電池と交換してください。
5. 湿気、高温、衝撃などを与えないようにしてください。
6. 同梱のアルカリ電池はモニター用ですので、早めに新しいアルカリ電池と交換するようお願いします。

アルカリ電池収納の仕方

1. 本体側面のセフティ・スイッチを **1** から **2** に移動し、電池収納蓋を矢印の方向に引き出します。
2. 電池のプラス / マイナスを正しくアルカリ電池収納に装着してください。
3. 電池収納蓋を押しこみ、セフティ・スイッチを **2** から **1** に移動して固定します。

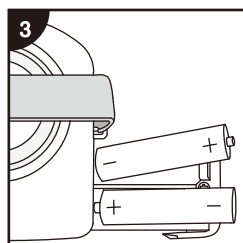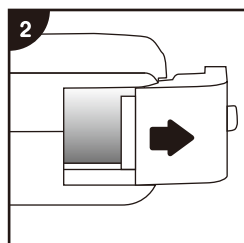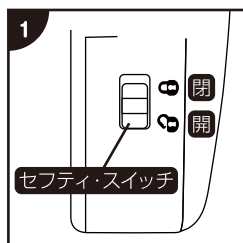

仕様

型式	サイズ (mm)	重量 (g)	材質	電源	音量増幅
UA30	65x64x28	67	ABS	単 4 アルカリ電池 x 2	最大 +30dB