

ER-20

イヤープロテクタ

取扱い説明書

ER-20は、全周波数帯域の音を平均的に約20dB低減する高性能フィルタ

使用方法

● 耳への挿入方法

1. キャップ部分を親指と人差し指でつまみます。
2. 耳を少し上向き / 外向きに引っ張ります。
3. ER-20の先をしっかりと快適に収まるまで挿入します。メガネを掛ける時のように少し左回転を加えながら挿入すると良いでしょう。

● 耳からの取外方法

1. ER-20のキャップをしっかりとつまみます。
2. メガネを外す時のように少し右回転を加えながら、ゆっくりと引き出します。決して無理やりに引き抜かないでください。


保存方法

先端部分のソフトシリコンを湿った布で時々拭いてください。音管部分は絶対に水に浸けないでください。

ご注意

- ER-20を分解しないでください。保証の対象外となります。
- 周囲の音圧レベルが95dBの場所では、ER-20を8時間以上使用しないでください。
- ER-20が破損したり、故障した場合は、使用しないでください。
(ER-20は、89/686EEC及び修正条項の性能基準を満たしています。)

各部名称

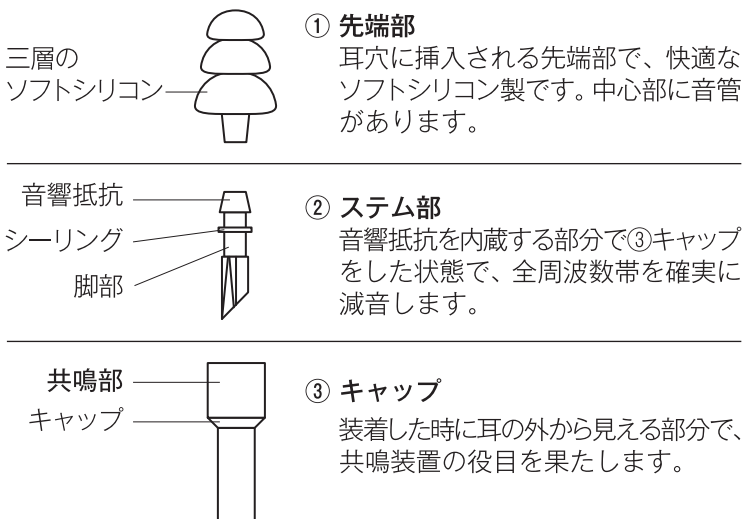

周波数帯別の低減

周波数 (Hz)	平均 (dB)	標準偏差 (dB)	最小保護値 (dB)
125	10.5	2.0	8.5
250	14.1	1.0	13.1
500	17.8	0.6	17.2
1000	19.0	1.4	17.6
2000	21.4	1.5	19.9
4000	23.2	3.5	19.7
8000	26.4	4.2	22.2