

バッテリーチェッカ 補聴器用空気電池残量計

バッテリーチェッカは、補聴器用空気電池の残量状況を確認するための計器です。

特徴：

1. 2個の予備電池用収納ケースを持つコンパクトな計器
2. 見やすい棒グラフで電池残量を表示し交換時期を表示
3. 持ち歩きにも便利なキーチェーン付
4. 電源不要

操作方法：

1. 電池の(+)面を上にし、バッテリーチェッカの盤面上に置きます。
2. 矢印に沿って、電池が金属片に触れるまで滑らせます。

残量の見方：

棒グラフの位置	電池残量の状況	
65%以下		電池残量が不足しています。ただちに電池交換してください。
65%~80%		電池残量が少なくなってきました。
80%以上		電池残量は充分にあります。

仕様：

型式	サイズ(mm)	重量(g)	材質	品質保証
HS-BC01	63×29×14	15	ABS	ご購入後一年間

注意：

1. 連続して10秒以上電池を計測しないでください。
2. 万一、電池を正しく設置しても棒グラフが表示されない場合は、電池残量がないと考えられます。
3. 必ず、電池の正極(+)を上にして計測してください。

株式会社 自立コム



〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-4
TEL.03(3476)2160 FAX.03(3476)2425
<http://www.jiritsu.com>