

MimiComfort

ミミコンフォート

耳あな式補聴器をしたまま快適に電話で
お話しできるイヤーパード



【使用法】

- 1) ミミコンフォートの両面テープを、切り込み線からはがします。
- 2) 受話器の受信部から脂分等を拭取り、ミミコンフォートを貼ります。
- 3) ミミコンフォートが受話器より大きい場合は、ハサミ等で切って調整してください。
- 4) 補聴器がミミコンフォートの中心の穴に入るようにしてお話してください。

【特 徴】

- 1) 補聴器のハウリング音や外部からの雑音の侵入を低減し、会話がしやすくなります。
- 2) 直接受話器を耳にあてても補聴器にあらず、長時間の通話でも疲れません。
- 3) 天然ラテックススポンジのため、肌を傷めず柔らかな感触が得られます。
- 4) ハサミなどで簡単に切れ、受話器サイズに合わせることができます。

【手入れ方法と使用上の注意】

- 1) 天然素材のため合成品と比べると耐久性は劣ります。特に脂分に対しては膨濁しやすいため、脂分を避けるとともに、汚れた場合は新しいものとお取替え願います。
- 2) 直射日光や蛍光灯の当たる場所での長期保存は劣化のもとですので避けてください。

型式	名称	サイズ(mm)	重量(g)	材質
JI-MMC	ミミコンフォート	40×40×10	2	天然ラテックス

Made in Japan



株式会社 自立コム

〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-4 TEL.03(3476)2160 FAX.03(3476)2425

<http://www.jiritsu.com>