


BE1431 マルチセンサ (テレホンセンサ) 発信器 マニュアル

取り付け方法

1. 付属の分岐コネクタで電話線を分配して電話とマルチセンサ (テレホンセンサ) 発信器に接続します。
2. 電池通電タブを引き抜くとテレホンセンサ発信器は電源が入ります。付属のクリーナで壁をきれいに拭いて、本体背部のマジックテープの保護フィルムを外してください。
3. マルチセンサ (テレホンセンサ) 発信器を壁などに貼りつけてください。付属のネジで固定することもできます。

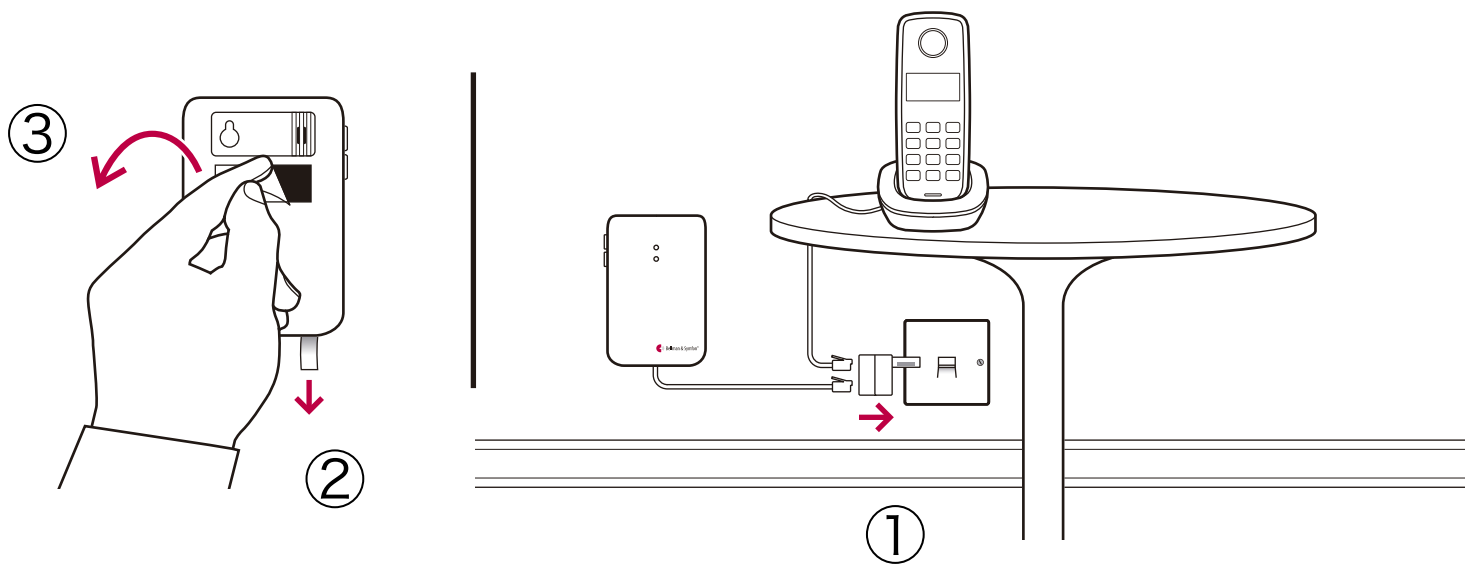

テスト方法

1. テストボタンを押すか、携帯電話で電話をかけます。
2. 電話が鳴ったら受信器類の電話マークアイコンが点灯して、音や光、振動でお知らせします (反応は受信器の種類によります)。もし反応がない場合はトラブルシューティングの章を参照してください。



アクセサリ類

マルチセンサ（テレホンセンサ）発信器には以下のアクセサリ製品を利用できます

1. 玄関マットスイッチ

- 誰かがマットに載ると反応します

2. モバイルフォンセンサ


- スマートフォン / 携帯電話 / タブレットの着信時ディスプレイ光で反応します

3. 磁気スイッチ

- 磁気スイッチが離れることでトリガします。ドアや窓の開閉で反応します

4. 外部トリガケーブル

- 移報出力でのインターフォン接続など

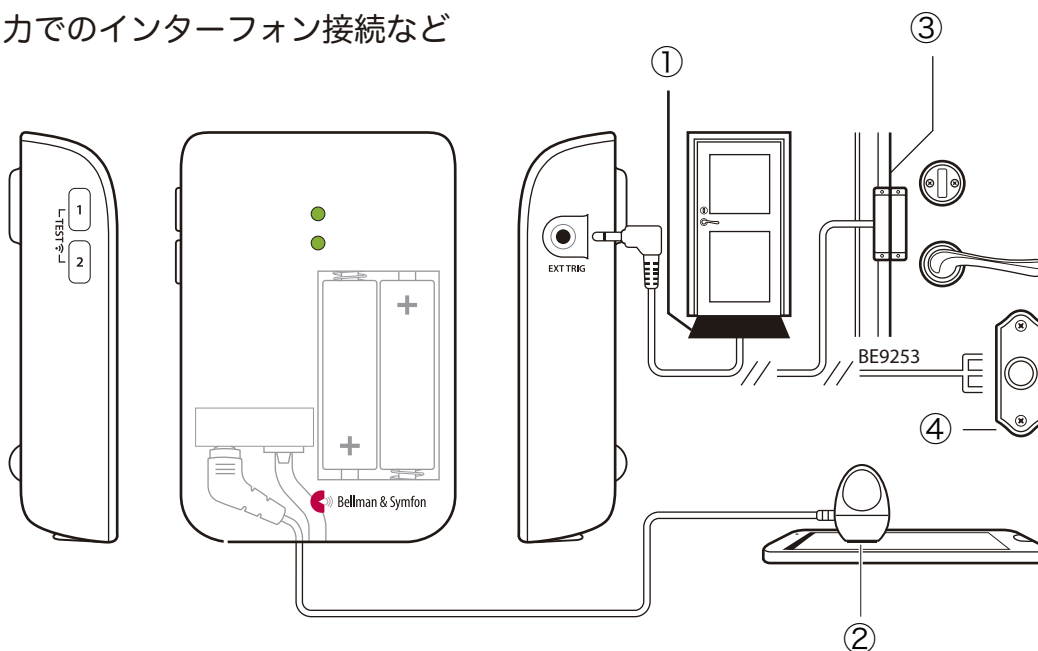

初期設定時の表示と信号

発信器表示

テストボタンを同時に押すか発信器が作動した場合、LED は緑に点灯します。これは受信器に無線を発信したことを表し LED の緑色は電池残量があることを示します。

もし橙に点滅した場合は電池交換の時期なので早めに電池を交換してください。

使用電池は単三アルカリ電池かリチウム電池です。

受信器信号

受信器が作動した場合は、光・振動・音で知らせます。初期信号パターンは以下の通りです。

発信器側	受信器側			
	LED	音	振動	光
固定電話	黄点灯	低音ベル音×1	早い	光る
スマートフォン	黄点灯	高音ベル音×2	早い	光る
磁気スイッチ 玄関マット 移報接続	緑点灯	低音チャイム音×1	早い	光る

技術情報

電源	電池： 2 x 1.5V 単三アルカリおよびリチウム (LR6)
電気消費	動作時 < 30mA 待機時 < 15 μ A
動作時間	アルカリ単三電池 ~5年 リチウム電池 ~10年
作動トリガ	テストボタン、RJ11 アナログ公衆電話回線 (26-120VRMS、15-100Hz)、2.5mm 外部トリガ、3.5mm外部トリガ
無線周波数帯	315MHz
無線到達距離	50m 直線見通し距離 到達距離は壁や大きな物体、その他の発信器などにより減衰の可能性あり
無線設定スイッチ アクセサリ	標準で 64 通り オプションのソフトで 256 通りまで可能 BE9250 モバイルフォンセンサ、BE9024 玄関マットスイッチ、 BE9023 磁気スイッチ、BE9253 外部トリガケーブル
追加情報	
使用について	室内での使用のみ 動作可能温度：15-35 $^{\circ}$ C 相対湿度：5%-95%
メンテナンスと クリーニング	メンテナンス不要 乾いた布で汚れを拭き、各種クリーナ (エアゾールスプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤) は使用不可、再利用不可

トラブルシューティング

- ・ 毎分橙色の LED が点灯
電池を交換してください。
単三アルカリかリチウム (LR6) のみ使用可能です。
- ・ 緑の LED が点灯しかし受信器は反応しない
マルチセンサ (テレホンセンサ) と受信器類の電池および電源プラグを確認してください。
受信器をマルチセンサ (テレホンセンサ) の近くに移動してください。
マルチセンサ (テレホンセンサ) と受信器類が同じ無線キーか確認してください。
無線キーの変更は導入の手引きを参照してください。
- ・ 電話のベルが鳴ったりアクセサリ類が作動しても、マルチセンサ (テレホンセンサ) の緑の LED が光らない
テストボタン 1、2 を同時に押すしてください。
緑の LED が点灯する場合はすべての接続を確認してください。
緑の LED が点灯しない場合は、電池を交換してください。
単三アルカリかリチウム (LR6) のみ使用可能です。
- ・ 2つのテストボタンを押しても緑の LED が点灯しない
電池を交換してください。
単三アルカリかリチウム (LR6) のみ使用可能です。
それでも緑の LED が点灯しない場合は販売代理店か株式会社自立コムへ
連絡してください。
- ・ 理由なく受信器が作動する
別のベルマンビジットシステムが使用中の機器を作動させている可能性があります。
すべての機器の無線キーを変更 無線キーの変更は導入の手引きを参照してください。

BE1431 マルチセンサ（テレホンセンサ）発信器 ディップスイッチ表

スイッチ位置	出力	固定電話 テストボタン	モバイルフォンセンサ	外部トリガー
 1 2 3 4	光	黄 常時点灯	黄 常時点滅	緑 常時点灯
	振動	早い	早い	遅い
	音	低音ベル音×1	高音ベル音×2	低音チャイム音×1
 1 2 3 4	光	黄 常時点灯	黄 常時点滅	緑 点滅×2
	振動	早い	早い	遅い
	音	低音ベル音×1	高音ベル音×2	低音チャイム音×2
 1 2 3 4	光	黄 常時点灯	黄 常時点滅	黄 点滅×3
	振動	早い	早い	早い
	音	低音ベル音×1	高音ベル音×2	高音ベル音×1
 1 2 3 4	光	黄 常時点灯	黄 常時点滅	橙 点滅×2
	振動	早い	早い	急速
	音	低音ベル音×1	高音ベル音×2	赤ちゃんモード
 1 2 3 4	光	黄 点滅×2	黄 常時点灯	橙 点滅×3
	振動	急速	早い	急速
	音	低音ベル音×2	低音ベル音×1	赤ちゃんモード
 1 2 3 4	光	黄 点滅×2	黄 常時点滅	緑 常時点滅
	振動	早い	急速	遅い
	音	低音ベル音×2	赤ちゃんモード	高音チャイム音×2
 1 2 3 4	光	橙 常時点滅	黄 点滅×3	緑 点滅×2
	振動	早い	早い	遅い
	音	赤ちゃんモード	高音ベル音×1	低音チャイム音×2
 1 2 3 4	光	黄 点滅×3	黄 点滅×2	緑 常時点滅
	振動	早い	早い	遅い
	音	高音ベル音×1	低音ベル音×2	高音チャイム音×2

スイッチ位置	出力	固定電話 テストボタン	モバイルフォンセンサ	外部トリガー
 1 2 3 4	光	黄 常時点滅	黄 常時点灯	緑 常時点灯
	振動	早い	早い	遅い
	音	高音ベル音×2	低音ベル音×1	低音チャイム音×1
 1 2 3 4	光	黄 常時点滅	黄 常時点灯	緑 点滅×2
	振動	早い	早い	遅い
	音	高音ベル音×2	低音ベル音×1	低音チャイム音×2
 1 2 3 4	光	黄 常時点滅	黄 常時点灯	黄 点滅×3
	振動	早い	早い	遅い
	音	高音ベル音×2	低音ベル音×1	高音チャイム音×1
 1 2 3 4	光	黄 常時点滅	黄 常時点灯	橙 点滅×2
	振動	早い	早い	急速
	音	高音ベル音×2	低音ベル音×1	赤ちゃんメロディ
 1 2 3 4	光	黄 点滅×3	黄 常時点灯	橙 点滅×3
	振動	早い	早い	急速
	音	高音ベル音×1	低音ベル音×1	赤ちゃんメロディ
 1 2 3 4	光	橙 常時点滅	黄 点滅×3	緑 常時点滅
	振動	急速	早い	遅い
	音	赤ちゃんメロディ	高音ベル音×1	高音チャイム音×2
 1 2 3 4	光	橙/赤交互点滅	橙/赤交互点滅	橙/赤交互点滅
	振動	長時間	長時間	長時間
	音	警報音	警報音	警報音
 1 2 3 4	光	赤 常時点滅	赤 常時点滅	赤 常時点滅
	振動	長時間	長時間	長時間
	音	火災警報音	火災警報音	火災警報音