


BE1491 ベビーセンサ発信器 マニュアル


取り付け方法

1. 電池通電タブを引き抜くとベビーセンサ発信器は電源が入ります。
2. ベビーセンサ発信器を赤ちゃんの手の届かない場所で、ベビーベッド近くのナイトスタンドなどに置いてください（推奨距離は0.5から2mです）。
3. 壁に固定することもできますので、その際はテープで仮止めしてください。
4. テスト方法の章を参照してテストしてください。
5. ベビーセンサ発信器を固定または壁に付属のネジで取り付けます。

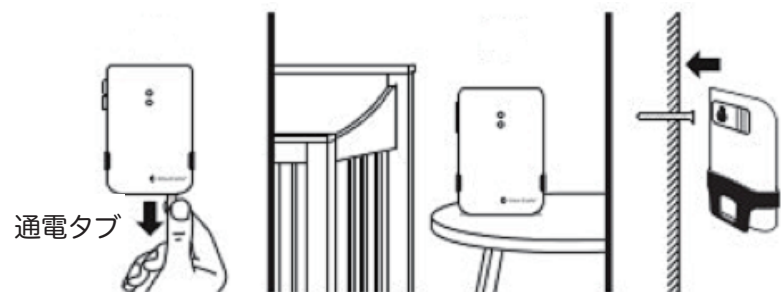

テスト方法

1. 赤ちゃんがいる場所のそばで音を立てます。
2. ベルマンビジット受信器類の赤ちゃんマークアイコンが点灯して、音や光、振動でお知らせします（反応は受信器の種類によります）。もし反応がない場合は設定方法の章を参照ください。

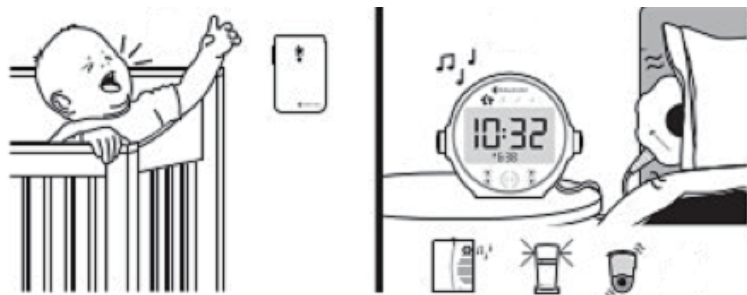

設定方法

感度や泣き声時間設定ボタンはベビーセンサ発信器の左側にあります。ボタンを押すとLEDが現在の設定を示します。さらにボタンを押すと設定変更できます。


- ・赤ちゃんが泣いてもベビーセンサが反応しない - 感度を上げてください
- ・ベビーセンサが反応しやすい - 感度を下げてください
- ・ベビーセンサの反応が早いもしくは遅い - 泣き声時間を調整してください

感度設定

	赤 LED	高い
	橙 LED	中
	緑 LED	低い


泣き声時間設定

	赤 LED	30 秒
	橙 LED	10 秒
	緑 LED	1 秒

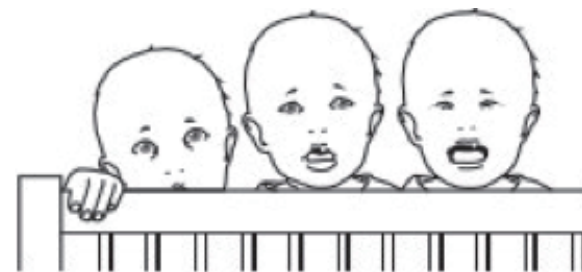

玄関マットスイッチの設置

玄関マットスイッチを使用すれば赤ちゃんがベッドから出た場合に知らせることができます。ベビーベッドの前に玄関マットを敷いて、ベビーセンサに接続すれば赤ちゃんがマットに乗ると受信機類が知らせてくれます。

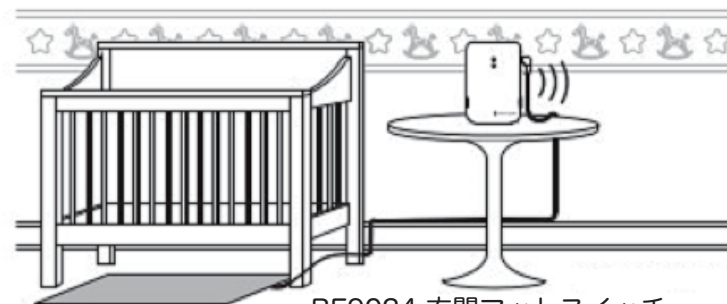

BE9024 玄関マットスイッチ

追加情報

注意事項	ベビーセンサは必ず赤ちゃんの手の届かない場所に設置 ベビーベットやベビーサークルには設置しない
使用について	室内での使用のみ 動作可能温度：15-35℃ 相対湿度：5%-95%
メンテナンス クリーニング	メンテナンス不要 乾いた布で汚れを拭き、各種クリーナー (エアゾールスプレー、溶剤、アルコール、アンモニア、 研磨剤) は使用不可 再利用不可

トラブルシューティング

- ・毎分橙色の LED が点灯
電池を交換。単三アルカリかリチウム (LR6) のみ使用可能
- ・ベビーセンサの緑の LED が点灯しかし受信器は反応しない
ベビーセンサと受信器類の電池および電源プラグを確認
受信器をベビーセンサの近くに移動
無線キーの変更は導入の手引きを参照
- ・赤ちゃんが泣いてもベビーセンサが反応しない
ベビーセンサを赤ちゃん近づけるか、マイク感度を上げる
設定の章を参照
- ・ベビーセンサが反応しやすい
注意：ベビーセンサは必ず赤ちゃんの手の届かない場所へ設置
感度を下げるか、ベビーセンサを赤ちゃんから離す
設定の章を参照
- ・ベビーセンサの反応が早い理由なく受信器が作動する
別のベルマンビジットシステムが使用中の機器を作動させている可能性がある
すべての機器の無線キーを変更
無線キーの変更は導入の手引きを参照

技術情報

電源	電池： 2 x 1.5V 単三アルカリおよびリチウム (LR6)
電気消費	動作時 < 30mA 待機時 < 150μA
動作時間	アルカリ単三電池 ~6ヶ月 リチウム電池 ~1年
動作トリガ	テストボタン、内蔵マイクおよび外部トリガにて 玄関マットスイッチ
無線周波数帯	315MHz
無線到達距離	50m 直線見通し距離 到達距離は壁や大きな物体、その他の 発信器などにより減衰の可能性あり
無線設定スイッチ アクセサリ	標準で 64 通り オプションのソフトで 256 通りまで可能 BE9024 玄関マットスイッチ

Bellman & Symfon

株式会社自立コム



取扱説明書

ベルマンビジットシステム

BE1491

品質保証書

材質または構造上の欠陥による動作不良が発生した場合にはご購入日より一年間、修理または商品交換により無料にて品質保証します。

当保証は、輸送途中の事故や衝撃などによる損傷、不正な修理、不当な使用によって発生した不具合については対象としないのでご注意ください。

ご購入後は、販売店名、ご購入日が記載された当保証書を大切に保管してください。保証をお受けになる場合は、お買い上げの販売店または株式会社自立コムに持参するか、郵送などにより商品をお届けください。その際、元払いにてお送りくださるようお願いいたします。返送の際は販売店または株式会社自立コムより元払いにてお送りします。

販売店名

ご購入日 年 月 日

※商品の仕様は予告なく変更される場合がございます

150-0044 東京都渋谷区円山町 28-4
5F 代表
TEL. 03-3476-2160 FAX. 03-3476-2425
6F 修理・デモ器



株式会社自立コム

TEL. 03-3476-2175 FAX. 03-3476-2435
<http://www.jiritsu.com>

製造元：Bellman&Symfon 製造国：中国